

# МК - 022

## модуль коленный



Инструкция по сборке изделия



### Модуль коленный МК-022


- моноцентрический коленный модуль с замком;
- предназначен для купания пациентов с малой степенью активности весом до 100 кг;
- применяется при протезировании после односторонней и двусторонней ампутации бедра на уровне верхней, средней и нижней трети;
- максимальный угол сгибания 120 градусов;
- масса модуля 220 г.




2

### Варианты сборки протезов с использованием МК-022

Протез на длинную кулью

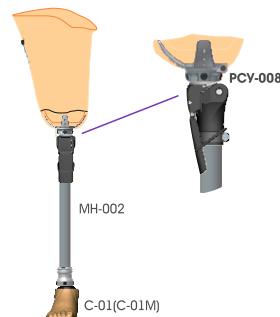

Протез на короткую кулью

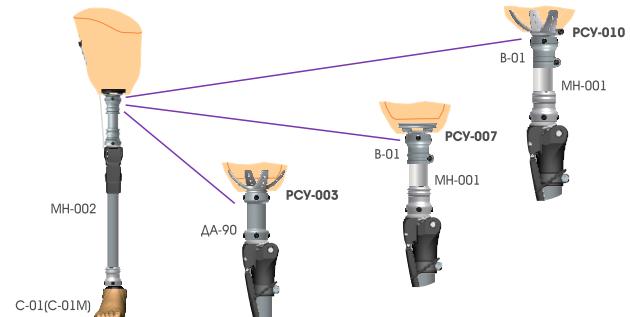


3

### Сборка протезов с использованием МК-022

При протезировании **на короткую кулью** соединить коленный модуль МК-022 посредством втулки «В-01» или двойного адаптера «ДА», либо с помощью аналогичной втулки другого производителя с трубкой несущей.

При протезировании **на длинную кулью** модуль соединить с гильзой посредством PCV-008. Затем выполнить необходимую юстировку и прятнуть юстировочные винты. После чего залить винты локтитом.

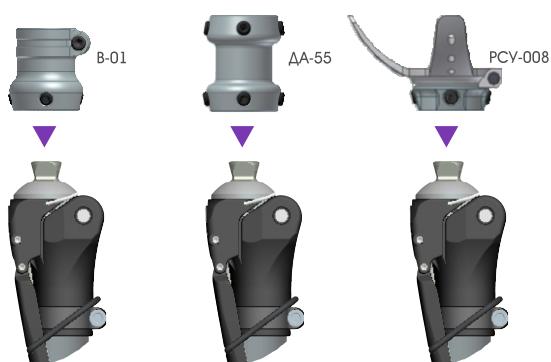


4

## Установка тянки

Тянка продевается через каналы при открытом модуле, контролируя ее проход.

Длина тянки регулируется изменением длины лески, с последующим накручиванием на кончик резьбовой втулки.

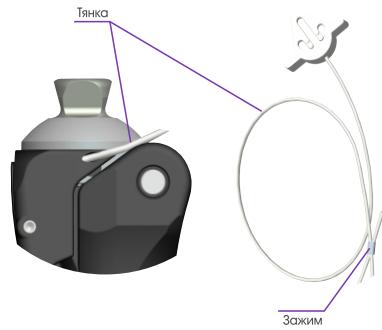


5

## Сборка протезов с использованием МК-022

Для последующей установки ручки фиксатора на наружную сторону культиприемной гильзы вливается закладная шайба на высоте, удобной для пациента.

При установке модуля МК-022 необходимо обеспечить требуемый зазор (3-4 мм) между головкой винта и верхней кромкой паза ручки фиксатора.

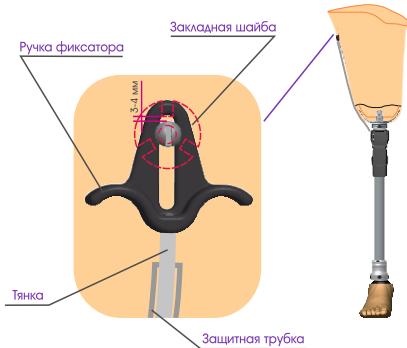

6

## Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует замену изделия в течение гарантийного срока со дня выдачи изделия при использовании согласно данной инструкции.

Гарантийный срок - 24 месяца.

Самостоятельная разборка и ремонт изделия не допускается.



7

Россия, г. Бердск  
Новосибирская область  
Коммерческий отдел: 8 383 363 04 26  
e-mail: kom@ortos.ru  
[www.ortos.ru](http://www.ortos.ru)

8